



INSTRUÇÕES DE USO - ESTUFA COMPACT

Siga as instruções passo a passo para obter o melhor desempenho do seu equipamento.


- O seu equipamento é bivolt automático pode ser ligado tanto em 127V como em 220V sem o risco de queimar. Conecte o aparelho na tomada, ligue o aparelho, abra a porta deixando-a por um período de pelo menos 20 minutos ligado, após este período o seu aparelho estará pronto para uso. **Atenção: Isto só será necessário na primeira vez que o equipamento for ligado.** Este processo é essencial para que o equipamento exale possíveis odores e fumaças decorrente da adaptação da Resistência e do isolamento térmico.
- A estufa Compact Mega Bell foi desenvolvida para atingir uma temperatura de 170°C com variável de $\pm 10\%$ (mínimo 153 °C / máximo 187 °C) e permanece a esta temperatura por todo o tempo em que estiver ligada, para interromper o aquecimento deve-se acionar a chave liga / desliga.
- A estufa Compact Mega Bell é um equipamento portátil, destinado ao uso doméstico não sendo permitido a utilização profissional dentro de salões de beleza e estética. Para utilização profissional são recomendadas as estufas de esterilização munidas de instrumentos de medição (termômetro e termostato) e vedação em borracha de silicone, conforme recomendação da ABNT.
- Os instrumentos a serem esterilizados devem ser previamente lavados em água corrente ou em álcool etílico abundantemente para que se remova todos os detritos existente, solicita que se use luvas descartáveis para a sua proteção e depois seca-los.
- Após serem limpos e secos, os instrumentos devem ser colocados de forma que permitam uma perfeita circulação de ar no interior da câmara da estufa acondicionados em estojo de inox ou embrulhados em papel laminado.
- Os instrumentos a serem esterilizados devem permanecer a uma temperatura de 170 °C por 1 (uma) hora ou 150 °C por 2 (duas) horas acondicionados em caixa metálicas fechadas ou embrulhados em papel alumínio.
- Não utilize pano molhado para retirar os instrumentos, evitando desta forma o choque térmico e a perda do corte do material, recomendamos utilizar pinça de inox.

CUIDADOS E PRECAUÇÕES

- Todas as instruções de operação devem ser lidas antes de operar o aparelho.
- As instruções de segurança e operação deverá serem guardadas para futuras referências.
- Limpeza - desligue o aparelho da tomada antes de iniciar a limpeza. Não use líquidos de limpeza.
- Use um pano seco e macio para a limpeza.
- Não sobrecarregue tomadas de energia. Isso pode acarretar danos e riscos de choque elétrico ou incêndio.
- Nunca tente reparar você mesmo o aparelho, procure sempre um TÉCNICO de oficinas autorizadas.
- Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante, agente autorizado ou pessoa qualificada, afim de evitar riscos.
- Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança. Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.

Aparelho Bivolt Automático 127-220 V - 25-30 W 50/60 Hz

Modelo	Tensão	Dimensões Externas L x A x C	Dimensões Internas L x A x C	Peso	Potência	Temperatura
Estufa Compact	127 V	150 x 75 x 200 mm	100 x 25 x 197 mm	800 gr	25 watts	min. 153 °C máx 187 °C
Estufa Compact	220 V	150 x 75 x 200 mm	100 x 25 x 197 mm	800 gr	30 watts	min. 153 °C máx 187 °C

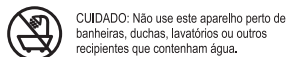

NORMAS REFERENCIAIS:

- IEC60335-1:2006
- IEC60335-2-23:2003

f /megabell.mb

Instagram /megabell.mb

Fabricado por: Mega Bell Ind. e Com. Ltda.
Av. Carioca, 394 - Vila Carioca - CEP: 04225-001 | São Paulo - SP - Brasil
Tel/Fax: (11) 2273-3015 / 2915-3321 | www.megabell.com.br | contato@megabell.com.br
CNPJ: 05.273.303/0001-00 - Insc. Estadual: 116.472.255.112

Rev02 - 14/05/2019

Certificado de Garantia

DATA DA COMPRA

IMPORTANTE:

Esta garantia será válida somente quando recebermos em nossa assistência técnica autorizada. Essa via deve ser preenchida corretamente, contendo a assinatura do vendedor e consumidor assim como endereço, telefone e numero de nota fiscal. A data de compra deve coincidir com a da Nota Fiscal.

Modelo: **ESTUFA COMPACT** N° N.F. : _____

Vendedor: _____ Consumidor _____

Rua: _____ Rua: _____

N°: _____ Tel.: () _____ N°: _____ Tel.: () _____

Cidade: _____ Estado: _____ Cidade: _____ Estado: _____

via de controle



Av. Carioca, 394 - Vila Carioca
CEP: 04225-001 - São Paulo - S. P. - Brasil
tel/fax: (11) 2273-3015 / 2915-3321
www.megabell.com.br - contato@megabell.com.br
CNPJ: 05.273.303/0001-00
Inscrição Estadual: 116.472.255.112

GARANTIA

A **MEGA BELL** Garante o correto funcionamento deste aparelho, colocando gratuitamente à sua disposição o departamento de assistência técnica, por 1 (um) ano a partir da data de compra.

É necessário destacar que esta garantia não terá validade caso seja constatado:

- Uso incorreto do aparelho.
- Manutenção do aparelho por empresas ou pessoas não autorizadas.
- Prescrição do prazo de garantia.
- Danos ocorridos no aparelho por acidente após a data de compra.
- Execução incorreta de manutenção do aparelho.



Av. Carioca, 394 - Vila Carioca
CEP: 04225-001 - São Paulo - S. P. - Brasil
tel/fax: (11) 2273-3015 / 2915-3321
www.megabell.com.br - contato@megabell.com.br
CNPJ: 05.273.303/0001-00
Inscrição Estadual: 116.472.255.112

Esta garantia será válida somente quando recebermos em nossa assistência técnica autorizada, essa via preenchida corretamente, contendo a assinatura do vendedor e consumidor assim como endereço, telefone e numero de nota fiscal. A data de compra deve coincidir com a da Nota Fiscal.

Vendedor: _____ Rua: _____

N°: _____

Rua: _____ Cidade: _____

N°: _____ Estado: _____

Estado: _____ Data da Compra: _____

Vendedor: Assinatura e Carimbo

Consumidor Assinatura