



PARAFIN ESTETIC

Aquecedor profissional de parafina para tratamento estético.

Recomendado para trabalhos realizados com pincel ou espátula. Está equipado com regulador de temperatura e indicador luminoso de funcionamento, chave seletora de voltagem, corpo plástico em ABS e sua resistência blindada o faz totalmente seguro.

Utilidade da parafina: ela é um produto derivado do petróleo, excelente retentor de calor que auxilia no tratamento estético. Uma camada de parafina quente, aplicada em qualquer lugar do corpo, produz um aumento da circulação sanguínea, dilatando os poros da pele, causando transpiração que atua como uma mini sauna. Processo que favorece a absorção dos cremes usados no tratamento, proporcionando hidratação, suavidade e elasticidade à pele.

Facial e corporal: o seu profundo efeito hidratante é ideal para pele seca, suaviza as rugas dando luminosidade à pele.

Manicure: relaxa e provoca uma aparência fresca e saudável, suaviza a pele e cutículas, não afetando as unhas artificiais.

Pedicure: ativa a circulação realçando o tom da pele e amaciando as calosidades.

Modo de usar a parafina: após fazer a higiene com a loção de limpeza, aplicar o leite de colágeno, massageando o local a ser tratado com a parafina. Aplicar em finas camadas nas áreas desejadas, com um pincel ou uma espátula. Em seguida com luvas descartáveis (para mãos), bota descartáveis (para os pés), ou toalha protetora (rosto e corpo), deixando agir de 15 a 20 minutos.

Instruções de uso Parafin Estetic: antes de conectar o aparelho a rede elétrica, verifique se a voltagem está de acordo com a tomada a ser ligado (chave seletora de voltagem encontra-se embaixo do aparelho).

Coloque a parafina no recipiente do aparelho (capacidade 400g)

Ligar o aparelho ajustando o botão de ajuste (KNOB) no máximo, até que a parafina derreta, após derretida diminuir gradativamente, até que se tenha uma temperatura que possibilite o seu uso.

Limpeza do aparelho: aqueça a parafina até torná-la líquida, desligue o aparelho e coloque a parafina em outro recipiente. Aguarde até o aparelho chegar a uma temperatura que permita a higiene. Limpe com um pano com álcool.

Importante para a sua segurança: não ligue o aparelho sem a parafina no recipiente. Não aperte nem puxe o botão de ajuste (KNOB) quando ligar ou regular a temperatura do aparelho, não utilize o aparelho em locais molhados.

- Caso seja danificado o cabo de alimentação ou apresente defeito, ele deve ser substituído pelo fabricante, agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.

- Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.

Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.



CUIDADO: Não use este aparelho perto de banheiras, duchas, lavatórios ou outros recipientes que contenham água.



APARELHO CLASSE II aparelho revestido de isolamento duplo contra choques elétricos.

NORMAS REFERENCIAIS:

- IEC60335-1:2006
- IEC60335-2-23:2003

Fabricado por: Mega Bell Ind. e Com. Ltda.
Av. Carioca, 394 - Vila Carioca - CEP: 04225-001
São Paulo - SP - Brasil - Tel/fax: (11) 2273-3015 / 2915-3321
www.megabell.com.br - contato@megabell.com.br
CNPJ: 05.273.303/0001-00 - Inscrição Estadual: 116.472.255.112

Certificado de Garantia

DATA DA COMPRA

____/____/____

IMPORTANTE:

Esta garantia será válida somente quando recebermos em nossa assistência técnica autorizada. Essa via deve ser preenchida corretamente, contendo a assinatura do vendedor e consumidor assim como endereço, telefone e numero de nota fiscal. A data de compra deve coincidir com a da Nota Fiscal.

Modelo: **Parafin Estetic** N° N.F. : _____

Vendedor: _____ Consumidor _____

Rua: _____ Rua: _____

N°: _____ Tel.: () _____ N°: _____ Tel.: () _____

Cidade: _____ Estado: _____ Cidade: _____ Estado: _____



Av. Carioca, 394 - Vila Carioca
CEP: 04225-001 - São Paulo - S. P. - Brasil
tel/fax: (11) 2273-3015 / 2914-3321
www.megabell.com.br - contato@megabell.com.br
CNPJ: 05.273.303/0001-00
Inscrição Estadual: 116.472.255.112

via de controle

GARANTIA

A MEGA BELL Garante o correto funcionamento deste aparelho, colocando gratuitamente à sua disposição o departamento de assistência técnica, por 6 meses a partir da data de compra.

É necessário destacar que esta garantia não terá validade caso seja constatado:

- Uso incorreto do aparelho.
- Manutenção do aparelho por empresas ou pessoas não autorizadas.
- Prescrição do prazo de garantia.
- Danos ocorridos no aparelho por acidente após a data de compra.
- Execução incorreta de manutenção do aparelho.



Av. Carioca, 394 - Vila Carioca
CEP: 04225-001 - São Paulo - S. P. - Brasil
tel/fax: (11) 2273-3015 / 2914-3321
www.megabell.com.br - contato@megabell.com.br
CNPJ: 05.273.303/0001-00
Inscrição Estadual: 116.472.255.112

Esta garantia será válida somente quando recebermos em nossa assistência técnica autorizada, essa via preenchida corretamente, contendo a assinatura do vendedor e consumidor assim como endereço, telefone e numero de nota fiscal. A data de compra deve coincidir com a da Nota Fiscal.

Vendedor: _____ Rua: _____

_____ N°: _____

Rua: _____ Cidade: _____

N°: _____ Estado: _____

Estado: _____ Data da Compra: _____

Vendedor: Assinatura e Carimbo

Consumidor Assinatura

Rev. 05 - 2022

/megabell.mb

/megabell.mb